


ALCOSCENT
Digitální detektor alkoholu

DA-3000



Návod k obsluze

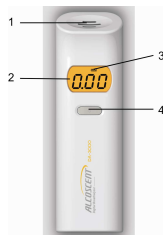

Jednotlivé části detektoru:

1. vstup vzduchu při foukání bez náustku. Při foukání s náustkem použijte přiložený nástavec.
2. displej
3. signalizace slabé baterie
4. tlačítko zapnutí (POWER)

Detekce alkoholu

1. Stiskněte tlačítko „POWER“. Detektor se s pípnutím zapne a na displeji se zobrazí počet provedených měření od poslední kalibrace. Počítadlo zobrazuje hodnoty do 99. Pak se začnou odpočítávat číslice k nule. Během této doby se zahřívá senzor detektoru a přístroj se připravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekund.
2. Jakmile skončí odpočítávání, na displeji se zobrazí „START“ a detektor bude krátce pípat, je tento připraven k testu. Nyní foukejte rovnoměrně do detektoru po dobu alespoň 3 sekund dokud neuslyšíte přerušované pípnutí.
3. Výsledek testu je po chvíli zobrazen na displeji po dobu asi 15 sekund, poté se detektor vypne.
4. Pokud detektor během 2 minut opět zapnete, pak bude odpočítávat jen po dobu asi 10 sekund. Dále postupujte dle bodů 1 – 3.

Vysvětlivky:

Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, je nutné baterie vyměnit.

Používejte pouze alkalické baterie.

„FL“ (Flow Error) – do detektoru jste foukali nerovnoměrně a měření je nutné opakovat.

„Er“ (Time Out) – měření není provedeno do 20 sekund, detektor se vypne.



